


荷蘭製 FFE & FFE Shooting 濾音器說明書 (產地: 荷蘭)

1. 產品不可接觸化學物質或酒精, 以免造成感染
2. 產品如被切傷或穿刺破損, 效能會降低或失去
3. 從拆封第一次使用開始算, 最高可用 4 個星期, 如果髒汙無法清潔或破損, 則提早丟棄.
4. 避免讓小朋友拿到, 以免誤食或誤用造成危險
5. 從耳朵取下耳塞要緩慢地取下, 不可快速拔出, 以免耳膜受傷
6. 使用前檢查產品是否破損或髒汙, 不當使用或髒汙破損仍使用, 會造成健康衛生問題

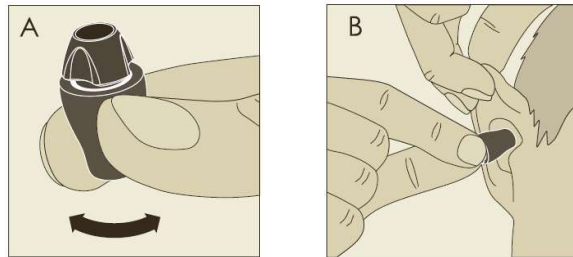

如何塞耳塞:

1. (圖 A) 先用手指將耳塞泡棉滾壓, 縮小體積
2. (圖 B) 塞右耳時, 左手從腦後繞過將右耳往上並往外拉(讓耳洞變大), 右手姆指和食指拿耳塞塞入, 如果可以再稍微旋轉一下, 然後等至少 10 秒, 等泡棉膨脹有隔音感覺後再放開, 泡棉膨脹到最完整可能要 45 秒, 請勿用蠻力硬塞, 塞左耳方式相同, 只是左右相反. 適用耳道直徑 6-12mm, 如果塞的太進去, 泡棉膨脹後可能會讓你不舒服, 請緩慢地取出, 然後重塞一次(從步驟 1 開始), 且不要塞太進去.

取下耳塞:

需注意取下耳塞要緩慢地取下, 不可快速拔出來, 如果可以再緩慢地旋轉.

清潔:

1. 每天用完可用乾淨的布沾點水輕輕擦拭, 以清除耳塞上的耳垢, 然後放著風乾, 沒有水份後才能再使用或, 不用時(且已風乾)請在放在乾淨的地方, 例如原包裝夾鏈袋或說明書夾鏈袋, 並不要和其他物品共放, 建議溫度在 10~50 度 C. **清潔時不可用酒精棉片或肥皂或化學藥劑**, 如有破損或髒汙且無法清潔或異物塞住聲音通道且無法清除, 基於安全及衛生問題, 請更換新品, 由於個人衛生問題, 本產品開封後無法退貨, 也不要和他人共用.

中文說明書如有不夠詳細或有遺漏地方, 以產品內附的英文說明書(instruction)為準